

Beknopte handleiding voor het aansluiten van AnaConDa

Stap 1

- Volg onderstaande stappen voor het aansluiten van AnaConDa aan de gasmonitor, afhankelijk van het type monitor dat gebruikt wordt.
Side-stream monitor: Sluit de gasbemonsteringslijn van AnaConDa aan op de gasmonitor. Om accumulatie van condens in het waterslot van de monitor te vertragen, wordt het gebruik van een bijkomende Nafion tube aanbevolen. (In dit geval dient de Nafion tube aangesloten te worden op AnaConDa).
Main-stream monitor: Tussen de endotracheale tube (ET-tube) en AnaConDa is een Airway adapter vereist.
- Verwijder de beschermende afsluitdop en sluit AnaConDa aan tussen de ET-tube en het Y-stuk.




Stap 2

- Monteer de juiste vuladapter op de fles Isofluraan (Baxter) of Sevofluraan (AbbVie).
- Vul de bijgeleverde spuit met ca. 20 ml lucht en monteer deze op de adapter.
- Houd de fles ondersteboven en trek het anestheticum op, met een 10 à 15-tal bewegingen. (Let op: genereer zeker geen overdruk in de fles!)
- Zet de fles terug recht en wacht 4 seconden om de druk te stabiliseren vooraleer de spuit weer los te koppelen.
- Verwijder de lucht uit de spuit en sluit af met de afsluitdop. Noteer de datum én het type anestheticum op het etiket van de spuit.




Stap 3

- Plaats de spuit in de spuitpomp en stel de pomp in voor BD Plastipak of Monoject 50, 50/60 of 60 ml.
- Verbind de toevoerlijn van AnaConDa (voor het anestheticum) met de spuit. Vul de toevoerlijn met een bolus van 1,5 ml via de spuitpomp. (Initiële 'start'bolus is 1,5 ml, 1,2 ml na vervanging – na 24 uren – van AnaConDa).
- Vul deze toevoerlijn NIET handmatig.
- Eens het anestheticum verdampt in AnaConDa, geeft de gasmonitor een Fet-waarde aan groter dan 0.
- Stel de spuitpomp in op 3ml/h voor Isofluraan of op 5ml/h voor Sevofluraan. Pas de dosering aan volgens de sedatiebehoeften van de patiënt.

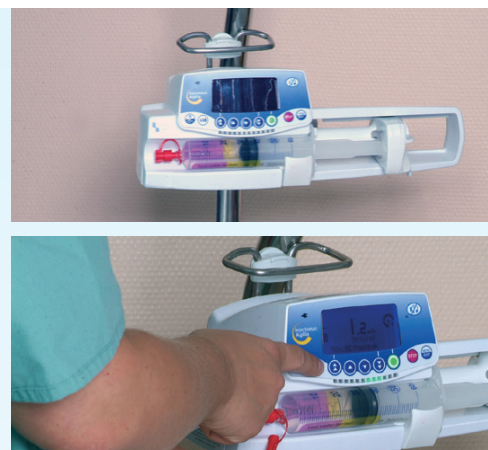

Stap 4

- De expiratoire concentratie wordt gemonitored door de Fet (End tidal concentration)-waarde.
- Gangbare Fet-waarden zijn: Isofluraan: 0,2 – 0,6% Fet / Sevofluraan: 0,5 – 1,0% Fet.
- Titreer de sedatie voor elke patiënt individueel, op basis van zijn/haar klinische noden.
- Voer, indien nodig, het debiet op d.m.v. een bolus van 0,1 à 0,5 ml om het sedatieniveau van de patiënt te verhogen.
- De bovenstaande waarden zijn gemiddelden en kunnen variëren volgens de noden van de patiënt.

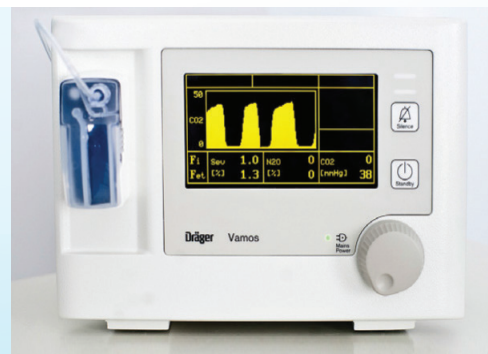

Beknopte handleiding voor het aansluiten van de gasfilter

Stap 1

- Fixeer de houder voor de actief koolstoffilter (FlurAbsorb) aan de ventilator.
- Plaats de FlurAbsorb in de houder en verwijder het beschermkapje.



Stap 2

Gebruik van de toebehoren/lijnen

- Bij sommige ventilatoren, is het nodig om een 22M/30F adapter te gebruiken aan de luchtuitgang van de ventilator.
- Hecht de 22mm flextube aan de uitlaat van de ventilator en verbind met de afvoerfilter



Stap 3

- Verbind, bij gebruik van een Side-stream monitor, de 8 mm O₂ tube met de tweede ingang van de Flurabsorb adapter. Dit om de opgevangen gassen tevens af te voeren.



Algemeen

- Nafion tube en gaslijn zijn 'single-patient'.
- AnaConDa is goed voor 24 uur.
- Gebruik GEEN extra HME-stuk (noch actief, noch passief)! AnaConDa is een hoogwaardige passieve bevochtiger (36 mg H₂O/liter).
- Een MRI-scan is mogelijk met AnaConDa:
 - Koppel de monitor af
 - Neem de spuitpomp mee op transport
 - Ontkoppel het Y-stuk en zet de spuitpomp af vóór de scanning (de patiënt blijft daarna nog ca. 0,5h geseedeerd)
- In combinatie met AnaConDa is een gesloten afzuigsysteem te verkiezen boven een open afzuigsysteem.

Voorbeelden van de gasfilteraansluitingen



Product	Code
AnaConDa Systeem	ANA-26000
AnaConDa spuit	ANA-26022
Connectie Kit	ANA-26072
Isofluraan adapter	ANA-26064
Sevofluraan adapter	ANA-26042
Nafion tube	ANA-26053
FlurAbsorb filter	ANA-26096
FlurAbsorb houder	ANA-26098