

Het gebruik van het **Tristel Trio™ Wipes** Systeem voor de ontsmetting van Transvaginale Echo Sondes

Voorafgaand aan het ontsmettingsproces, naar deze notities verwijzen.

- Desinfecteer de handen en draag handschoenen tijdens het werken met ontsmettingsmiddelen en medische instrumenten.
- Houd de zakjes van de gebruikte doekjes naast het Record Book zodat de details kunnen worden opgeschreven aan het einde van elk ontsmettingsproces.
- Gooi de gebruikte doekjes en handschoenen weg in overeenstemming met richtlijnen van het ziekenhuis.
- Verwijder het condoom van de sonde met een papieren doek en gooi het weg als klinisch afval.
- Bereid het ontsmettingsproces voor door elk van de doekjes en het Aktivatorschuim uit de doos te pakken.



Stap 1 - Voorafgaande aan reiniging, gebruik een Tristel Dry Wipe om gelresten van de sonde te verwijderen.

REINIGING



Stap 2 - Verwijder het reinigingsdoekje uit het zakje en vouw het uit in de palm van de hand.



Stap 3 - Reinig de sonde van 'schoon' naar 'niet schoon': begin bij de houder, dan de kabel en werk richting het handvat en uiteinde van de sonde.

Plaats de sonde terug in de houder. Na deze stap, ontsmet handen en draag een nieuw paar handschoenen.



HOOG-NIVEAU ONTSMETTING



Stap 4 - Verwijder het sporicide doekje het zakje en vouw het uit in de palm van de hand.



Stap 5 - Breng twee doses Aktivatorschuim aan op het doekje.




Stap 6 - Vouw het doekje en knijp gedurende 15 seconden om chloordioxide te genereren.

Het gehele doekje dient met schuim bedekt te zijn.



Stap 7 - Ontsmet de sonde van 'schoon' naar 'niet schoon': begin bij de houder, dan de kabel en werk richting het handvat en uiteinde van de sonde. Alle oppervlakken van het instrument dienen tenminste een keer met het doekje in contact te komen.

NASPOELING

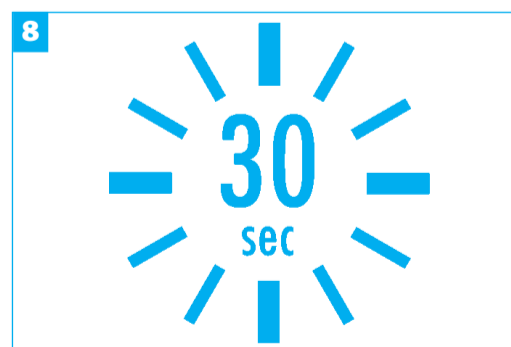

Stap 8 - Plaats de sonde terug in de houder en observeer de 30-seconden contacttijd.



Stap 9 - Verwijder het spoeldoekje uit het zakje en vouw het uit in de palm van de hand.



Stap 10 - Spoel de sonde om ontsmettingsmiddel te verwijderen en plaats het terug in de houder.

TRACEREN



Stap 11 - Verwijs naar de gebruikte zakjes van de Tristel doekjes en het Aktivatorschuim om het Record Book in te vullen.