

Tristel Duo™

Ultrasound


Gebruik voor reiniging en hoog niveau desinfectie van non-invasieve en invasieve ultrasone echosondes



De pomp twee keer indrukken om het schuim op een niet-absorberend doekje, bij voorkeur Tristel Dry Wipes, aan te brengen.



Gebruik nu het doekje om het schuim over het gehele oppervlak van het instrument, inclusief de kabel, te verspreiden.

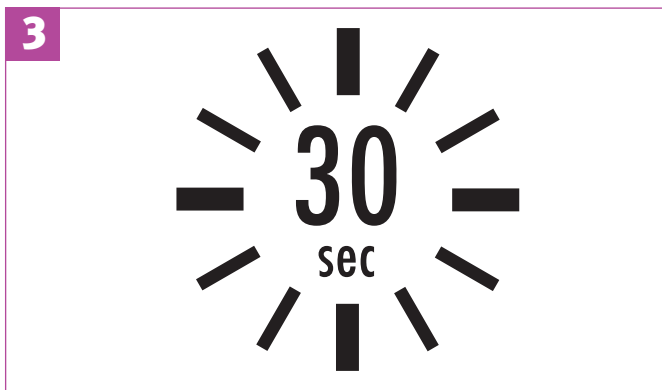

Respecteer de contacttijd van minimaal 30 seconden. Daarna laten drogen of naspoelen.

Opmerkingen:

- Voorafgaand aan de desinfectie dient de sonde te worden afgeveegd om zichtbaar vuil of resten van ultrasound gel van het medische apparaat te verwijderen. De sonde dient dan gereinigd te worden. Tristel raadt hiervoor het gebruik van Tristel Dry Wipes en Tristel Pre-Clean Wipes aan.
- Ontsmet handen en draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij het omgaan met desinfecterende middelen en medische hulpmiddelen.
- Gooi de doekjes en handschoenen weg in overeenstemming met de richtlijnen van het ziekenhuis.
- Volg altijd de ziekenhuis protocollen en de instructies van de fabrikant op.
- Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.
- Alleen voor professioneel gebruik.

Tristel

Created by: Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

Voor Tristel octrooi-informatie kunt u terecht op <http://www.our-patents.info/tristel>

ecomed
Innovative in reducing infection risk

Exclusieve verdeler Benelux en Frankrijk:

Ecomed NV, Smallandlaan 14 B, 2660 Antwerpen, België - T 3 889 26 40
Ecomed Nederland bv, Binderij 7 R, 1185 ZH Amstelveen, Nederland - T 020 808 51 34
E info@ecomед.eu - W www.ecomed.eu

Copyright © 2017 Tristel Solutions
Mkt-Wal-259-1