

Het gebruik van het Tristel Trio™ Wipes Systeem voor de ontsmetting van Bonfils Intubatie Endoscopen

Voorafgaand aan het ontsmettingsproces gaarna naar deze notities verwijzen.

- Desinfecteer de handen en draag handschoenen tijdens het werken met ontsmettingsmiddelen en medische instrumenten.
- Houd de zakjes van de gebruikte doekjes naast het Record Book zodat de details kunnen worden opgeschreven aan het einde van elk ontsmettingsproces.
- Gooi de gebruikte doekjes en handschoenen weg in overeenstemming met richtlijnen van het ziekenhuis.
- Het ontsmettingsgebied dient in “schoon” en “niet schoon” te worden verdeeld.
- Plaats het besmette instrument in het corresponderende gebied alvorens met de ontsmetting te beginnen.
- Bereid het ontsmettingsproces voor door elk van de doekjes en het Aktivatorschuim uit de doos te pakken.



REINIGING



Stap 1 - Verwijder het reinigingsdoekje uit het zakje en vouw het uit in de palm van de hand.

Stap 2 - Reinig het instrument van ‘schoon’ naar ‘niet schoon’: begin bij het handvat, werk richting het uiteinde van het instrument en plaats het terug in het ‘niet schoon’ gebied.

Desinfecteer handen en draag een nieuw paar handschoenen.

HOOG-NIVEAU ONTSMETTING



Stap 3 - Verwijder het sporicide doekje het zakje en vouw het uit in de palm van de hand.

Stap 4 - Breng twee doses Aktivatorschuim aan op het doekje.

Wanneer het 50ml Aktivatorschuim gebruikt wordt, vier doses aanbrengen.

HOOG-NIVEAU ONTSMETTING



Stap 5 - Vouw het doekje en knijp gedurende 15 seconden om chloordioxide te genereren. Het gehele doekje dient met Schuim bedekt te zijn.

Stap 6 - Ontsmet het instrument van ‘schoon’ naar ‘niet schoon’. Begin bij het handvat en werk richting het uiteinde van het instrument. Alle oppervlakken van het instrument dienen tenminste een keer met het doekje in contact te komen.

Stap 7 - Plaats het instrument in het ‘schoon’ gebied en observeer de 30-seconden contacttijd.

NASPOELING



Stap 8 - Verwijder het spoeldoekje uit het zakje en vouw het uit in de palm van de hand.

Stap 9 - Spoel het instrument om ontsmettingsmiddel te verwijderen en plaats het terug in het ‘schoon’ gebied of in een Tristel Protect transportzak.

TRACEREN & TRANSPORT



Stap 10 - Verwijs naar de gebruikte zakjes van de Tristel doekjes en het Aktivatorschuim om het Record Book in te vullen.

Stap 11 - Het instrument is nu klaar voor hergebruik of opslag.

Tristel Protect wordt aanbevolen voor veilig transport naar de volgende patiënt.

Tristel

Geproduceerd in Groot-Brittannië door:
Tristel™ Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, CB8 7NY
T +44 (0) 1638 721500 E mail@tristel.com W www.tristel.com

ecomed
Innovative in reducing infection risk

Exclusief verdeler Benelux & Frankrijk:
Ecomed Services bvba, Antwerpen, België, T (België) +32 (0)3 889 26 40,
T (Nederland) +31 (0)2 080 85 134, E info@ecommed.eu