

Tristel Duo™

OPH

High-level desinfecterend schuim

VOOR DIAGNOSTISCHE
CONTACTLENZEN



Opmerking:

- Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.
- Ontsmet handen en draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij het omgaan met desinfecterende middelen en medische hulpmiddelen.
- Verwijder de transportsloten die ervoor zorgen dat het pompje tijdens het transport niet wordt ingedrukt.
- Wanneer Tristel Duo OPH voor de eerste maal wordt gebruikt, druk dan tot 4 maal om de pomp te vullen.
- Wanneer het oppervlak zichtbaar vuil is, volg dan het reinigingsprotocol van het ziekenhuis op.
- Alleen voor professioneel gebruik.
- De vervaldatum blijft ongewijzigd bij gebruik.

STAP 1



Breng twee doses Tristel Duo aan op een Tristel Dry Wipe of meteen op het instrument.

STAP 2



Gebruik het doekje om het schuim over het gehele oppervlak van het instrument te verspreiden en zorg ervoor dat alles goed is bedekt. Herhaaldelijk wrijven over het oppervlak is niet nodig en moet worden vermeden om scheuren van het doekje te voorkomen.


Opmerking: Gooi het gebruikte doekje weg in overeenstemming met de richtlijnen van het ziekenhuis. Niet laten inwerken. Niet hergebruiken.

STAP 3



Respecteer de contacttijd van minimaal **30 seconden**.

STAP 4

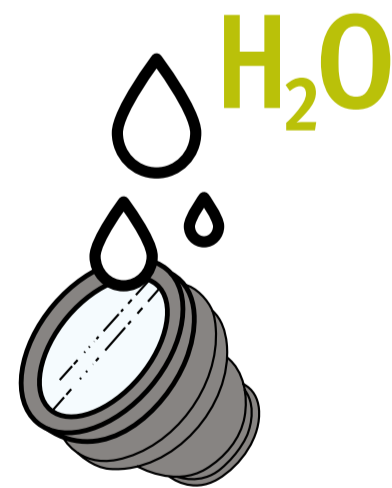

Spoel het instrument na met steriel water. Tristel Rinse Wipes worden aanbevolen.

Opmerking: Berg het medisch instrument op in overeenstemming met het ziekenhuisprotocol om schade en herbesmetting te voorkomen.

Tristel™

Created by: Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

ecomed

Exclusieve verdeler Benelux en Frankrijk:

Ecomed NV, Smallandlaan 14 B, 2660 Antwerpen, België - T 3 889 26 40
Ecomed Nederland bv, Binderij 7 R, 1185 Amstelveen, Nederland - T 020 808 51 34
E info@ecommed.eu - W www.ecomed.eu

For Tristel patent information please visit: <http://www.our-patents.info/tristel>

Copyright © Tristel Solutions
Mkt-Wal-125-2
February 2018