



ecomed

Innovative in reducing infection risk

DESINFECTIE VAN MEDISCHE INSTRUMENTEN

- Desinfectie in 30 seconden
- Niet toxisch
- Compatibel met alle echosondes



TRISTEL DUO ULTRASOUND

Hoog niveau desinfectie
voor invasieve echosondes



KENMERKEN

- Hoog niveau desinfectie in 30 seconden contacttijd
- Combineert, in één stap, een (lichtjes) reinigende functie (bevat detergent) met een sporicide werking
- Werkzaam (in 30 seconden) tegen onder meer *Bacillus subtilis*, *Clostridium difficile*, *Mycobacterium tuberculosis*, *MRSA*, *norovirus*, *HPV*, *hepatitis B en C*, *Fusarium solani*, *Aspergillus flavus*, *Acinetobacter baumannii*, *VRE*, *CPE*,...
- Wordt aangebracht met een niet-absorberend doekje, bij voorkeur Tristel Dry Wipes
- Compatibel met echosondes van alle toonaangevende fabrikanten
- Medisch hulpmiddel klasse IIb (conform de Europese Richtlijn met betrekking tot de Medische Hulpmiddelen 93/42/EEC en de wijzigingsvoorstellen 2007/47/EC en hun bijlage II)
- Niet irriterend, niet toxisch en biologisch afbreekbaar

TOEPASSINGEN

Hoog niveau desinfectie van:

- alle rigide ultrasone echosondes
- sondes voor endovaginale echografie
- sondes voor rectale echografie
- sondes voor bekkenbodetherapie
- Ultrasoon toestellen, kabels en toebehoren

Tristel Duo Ultrasound werd specifiek ontwikkeld voor hoog niveau desinfectie van invasieve en rigide ultrasone echosondes.

Dankzij de brede en snelle werkzaamheid biedt Tristel Duo Ultrasound een snelle en veilige desinfectie ten aanzien van patiënten en een ideale oplossing voor personeel en materiaal.

**ecomед**

Innovative in reducing infection risk

Meer info?

Belux

03 889 26 40

Nederland

020 808 51 34

info@ecomед.eu


SPECTRUM EN DESINFECTEREND VERMOGEN

Tristel Duo Ultrasound levert een kwalitatief hoogstaand desinfecterend schuim op basis van chloordioxide (ClO₂). Tristel Duo Ultrasound biedt een bactericide, mycobactericide, virucide, fungicide en sporicide werking met een contacttijd van 30 seconden.

Testvereisten conform de Europese Normen	
Bacteria	EN 13727, EN 14561
Mycobacteria	EN 14563, EN 14348
Gisten en Fungi	EN 13624, EN 14562
Virus	EN 14476, incl. Papillomavirus
Sporen	EN 14347

EN-normen
gevalideerd
in 30 seconden

GEBRUIKSAANWIJZING

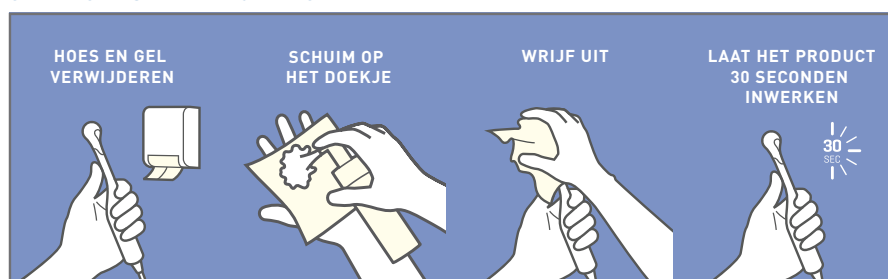

1. Doe handschoenen aan.
2. Druk op de doseerpomp om twee doses schuim te verkrijgen. Wrijf het schuim goed uit over het gehele oppervlak van het instrument.
3. Gebruik hiervoor een doekje, bij voorkeur Tristel Dry Wipes.
4. Gooi daarna het doekje weg als gewoon afval.
5. Laat het product zeker 30 seconden inwerken op het oppervlak van het instrument. Laat drogen.

PRODUCTEN



- Tristel Duo Ultrasound 600ml [750 doses/cassette]
Ref-code: DUO-ULT-M
- Tristel Duo support
Ref-code: MAXI-SUP



- Tristel Duo Ultrasound 250ml [312 doses/flacon]
Ref-code: DUO-ULT-L



- Tristel Dry Wipes bus [200 doekjes/bus]
Ref-code: Dry-Wipes
- Tristel Dry Wipes support
Ref-code: DRY-SUP

TECHNISCHE KENMERKEN

Elke verpakking Tristel Duo Ultrasound bevat 2 afzonderlijke compartimenten met:

- 1 compartiment citroenzuur a 5%
- 1 compartiment natriumchloriet a 0,5%

Elke schuimbeurt geeft 0,8 ml oplossing met chloordioxide [0,4 ml + 0,4 ml] a 200 ppm.

De vervaldatum na opening = de aangegeven vervaldatum op de verpakking.

TRISTEL WORDT EXCLUSIEF VERDEELD DOOR ECOMED IN BELGIË, FRANKRIJK, GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG EN NEDERLAND

ECOMED NV

Smallandlaan 14 B - B-2660 Antwerpen
T 03 889 26 40 - info@ecomед.eu
www.ecomed.eu

Bestellingen via orders@ecomед.eu

ECOMED NEDERLAND BV

Binderij 7 R - 1185 ZH Amstelveen
T 020 808 51 34 - info@ecomед.eu
www.ecomed.eu

Bestellingen via bestellingen@ecomед.eu