




# Tristel Wipe desinfectie Procedure

Deze procedure beschrijft de desinfectie van de sonde of scope en omvat 3 onderdelen, uiteengezet in 10 stappen.

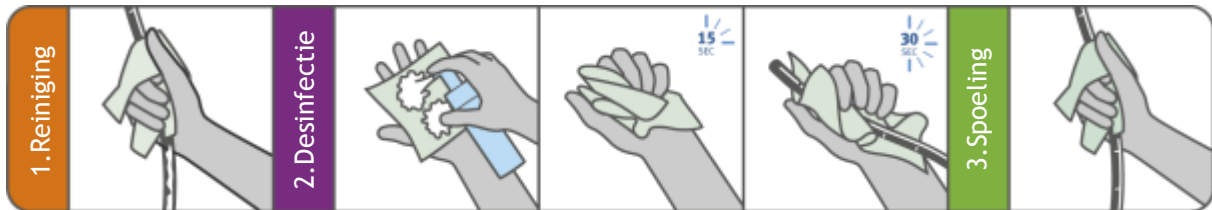

- Stap 1:** Doe handschoenen aan.
- Stap 2:** Reinig altijd het instrument vooraleer de Tristel Sporicidal Wipe te gebruiken. Gebruik hiervoor de Tristel Pre Clean Wipe.
- Stap 3:** Neem 1 zakje Sporicidal Wipe, scheur open, neem het doekje eruit.
- Stap 4:** Vouw het doekje open.
- Stap 5:** Pomp de “Activator Foam” 2 maal op het doekje. Indien het flesje “Activator Foam” voor het eerst wordt gebruikt, pomp 4 maal om het schuim te laten komen.
- Stap 6:** Knijp nu 15 sec. in het doekje, zodat het volledig bedekt is met schuim.
- Stap 7:** Wrijf het instrument nu goed in met Tristel. Het volledige oppervlak van het instrument moet contact maken met het doekje.
- Stap 8:** Wacht 30 seconden. Gooi het doekje weg als klinisch afval.
- Stap 9:** Spoel het toestel nu grondig, gebruikmakend van de Rinse Wipe.
- Stap 10:** Kleef de labels in het Quality Audit Trail boek, en patientendossier. (Indien van toepassing)



### Quality Audit Trail boek:

