

Tristel Trio™

Wipes System

De complete oplossing voor de hoog niveau ontsmetting van instrumenten zonder werkkanaal

Het gebruik van het Tristel Trio Wipes Systeem voor de ontsmetting van transoesofageale echocardiografie (TOE/TEE) sondes.

REINIGING



1. Neem het Reinigingsdoekje uit het zakje en vouw het uit in uw handpalm.

Een eerste voorreiniging in overeenstemming met het ziekenhuis protocol dient onmiddellijk na gebruik van het instrument te worden uitgevoerd.

2. Reinig het instrument om alle zichtbaar vuil te verwijderen, zonder het instrument te buigen, en besteed aandacht aan randen, ribbels en inhammen.

Wanneer nodig, gebruik meer doekjes om zeker te zijn dat het instrument zichtbaar schoon is. Plaats de sonde in het "niet schone" gebied. Gooi het gebruikte doekje en de handschoenen weg als klinisch afval. Ontsmet de handen en draag nieuwe handschoenen.

HOOG NIVEAU ONTSMETTING



3. Neem het Sporicide doekje uit het zakje en vouw het uit in uw handpalm.

4. Neem het 100ml Activatorschuim en breng twee doses aan op het doekje.

HOOG NIVEAU ONTSMETTING



5. Verfrommel het doekje gedurende 15 seconden om chloordioxide te genereren. Het gehele doekje dient met schuim bedekt te zijn.



6. Ontsmet het instrument zodat alle oppervlakken bedekt zijn met schuim. Wanneer nodig, gebruik meer doekjes om zeker te zijn dat het instrument volledig nat is. Plaats de sonde in het "schoone" gebied. Gooi het gebruikte doekje weg als klinisch afval.



7. Observeer een minimum contacttijd van 30 seconden.

NASPOELING



8. Neem het Spoeldoekje uit het zakje en vouw het uit in uw handpalm.

9. Spoel de sonde om overtollig schuim te verwijderen.

Wanneer nodig, gebruik meer doekjes om zeker te zijn dat alle schuim verwijderd is. Plaats de sonde in het "schoone" gebied. Gooi het gebruikte doekje weg als klinisch afval.

TRACEREN



10. Verwijs naar de gebruikte zakjes van de Tristel doekjes en het Activatorschuim om het Record Book in te vullen.

Opmerkingen:

- Ontsmet handen en draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij het omgaan met desinfecterende middelen en medische hulpmiddelen.
- Bewaar de zakjes van de gebruikte doekjes zodat de details kunnen worden ingevuld in het Tristel Quality Audit Trail Record Book.
- Het ontsmettingsgebied dient in "schoon" en "niet schoon" te worden verdeeld.
- Bereid het ontsmettingsproces voor, door elk van de doekjes en het Activatorschuim uit de doos te pakken.
- Gooi de doekjes en handschoenen weg in overeenstemming met de richtlijnen van het ziekenhuis.
- Volg altijd de ziekenhuisprotocollen en de instructies van de fabrikant op.
- Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is en/of als de doekjes droog zijn.
- Wanneer nodig, gebruik meer doekjes om zeker te zijn dat het instrument zichtbaar schoon is.
- Alleen voor professioneel gebruik.