



**ecomed**

Innovative in reducing infection risk

## DESINFECTIE VAN MEDISCHE INSTRUMENTEN

- Desinfectie in 30 seconden
- Niet toxisch
- Ideaal voor 3-spiegelglazen
- Eenvoudig in gebruik

# TRISTEL DUO OPHTALMO



Hoog niveau sporicide  
ontsmettingschuim  
voor medische instrumenten  
gebruikt in oogheelkunde



Tristel Duo Ophtalmo werd speciaal ontwikkeld voor een veilige en hoog niveau desinfectie van elk ophthalmologisch medisch hulpmiddel zoals gebruikt tijdens de raadpleging. Tristel Duo Ophtalmo biedt een eenvoudige, snelle [30 sec], gevalideerde en duurzame desinfectie voor semi-kritisch instrumentarium.

### KENMERKEN

- Hoog niveau desinfectie in 30 seconden, gebaseerd op de unieke chloordioxide samenstelling van Tristel
- Combineert een reinigende functie (bevat ook detergent) met een sporicide werking
- Chloordioxide is werkzaam tegen o.m. volgende micro-organismen: *Acanthamoeba keratitis*, *Adenovirus*, *Aspergillus flavus*, *Candida albicans*, *Fusarium solani*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*,...
- Wordt aangebracht met een doekje, bij voorkeur met Tristel Dry Wipes
- Compatibel met en niet-corrosief voor het materiaal
- Niet toxisch, niet irriterend en biologisch afbreekbaar
- Medisch hulpmiddel klasse IIa [conform de Europese Richtlijn met betrekking tot de Medische Hulpmiddelen 93/42/EEC en de wijzigingsvoorstellen 2007/47/EC en hun bijlage II]

### TOEPASSINGEN

- Tonometer prisma's en kegels
- 3-spiegelglazen
- Biometrie sondes
- Pachymetrie sondes
- Ultrasoon apparatuur

Spoelen na elke desinfectie is noodzakelijk.

**ecomед**

Innovative in reducing infection risk

Meer info?

Belux

03 889 26 40

Nederland

020 808 51 34

info@ecomед.eu

## SPECTRUM EN DESINFECTEREND VERMOGEN


Tristel Duo Opthalmo is sporicide, mycobactericide, virucide, fungicide en bactericide met een contacttijd van slechts 30 seconden, en is volledig in overeenstemming met de Europese normen zoals getest in onafhankelijke laboratoria.

Tristel Duo Opthalmo is effectief tegen de volgende micro-organismen:

**EN-normen  
gevalideerd  
in 30 seconden**

Testvereisten conform de Europese normen		
Sporen	Clostridium difficile, Bacillus subtilis, Bacillus cereus	EN 14347
Mycobacteriën	Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae [TB]	EN 14563, EN 14348
Virussen	Poliovirus T1, Adenovirus T5, Polyomavirus Sv40 [HPV], Vacciniavirus, Influenza H1N1	EN 14476
Fungi	Candida albicans, Fusarium solani, Aspergillus flavus	EN 14562, EN 131624
Bacteriën	Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Meticilline-resistente Staphylococcus aureus [MRSA]	EN 13727, EN 14561
Amoeba	Acanthamoeba keratitis	specifieke labotest

## GEBRUIKSAANWIJZING

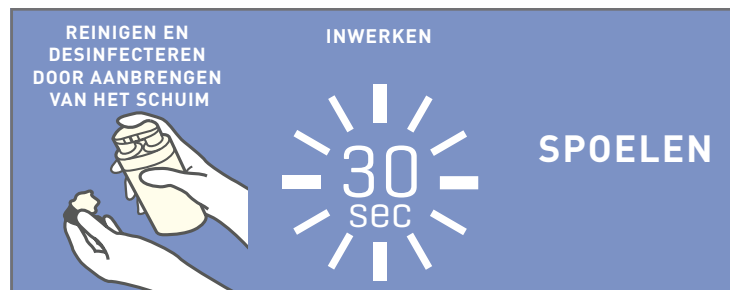

1. Doe handschoenen aan.
2. Druk op de doseerpomp om twee doses schuim te verkrijgen. Wrijf het schuim goed uit over het gehele oppervlak van het instrument.
3. Gebruik hiervoor een doekje, bij voorkeur Tristel Dry Wipes.
4. Gooi daarna het doekje weg als gewoon afval.
5. Laat het schuim, gedurende zeker 30 seconden, goed inwerken.
6. Spoel het instrument zorgvuldig met steriel of gefilterd water, of met een Tristel Rinse Wipe.

## PRODUCTEN



- Tristel Duo Opthalmo 600ml [750 doses/cassette]  
Ref-code: DUO-OPHT-M
- Tristel Duo support  
Ref-code: MAXI-SUP



- Tristel Duo Opthalmo 250ml [312 doses/flacon]  
Ref-code: DUO-OPHT-L



- Tristel Dry Wipes bus [200 doekjes/bus]  
Ref-code: Dry-Wipes
- Tristel Dry Wipes support  
Ref-code: DRY-SUP

## TECHNISCHE KENMERKEN

Elke verpakking Tristel Duo Opthalmo bevat 2 afzonderlijke compartimenten met:

- 1 compartiment citroenzuur a 5%
- 1 compartiment natriumchloriet a 0,5%

Elke schuimbeurt geeft 0,8 ml oplossing met chloordioxide [0,4 ml + 0,4 ml] a 200 ppm.

De vervaldatum na opening = de aangegeven vervaldatum op de verpakking.

TRISTEL WORDT EXCLUSIEF VERDEELD DOOR ECOMED IN BELGIË, FRANKRIJK, GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG EN NEDERLAND

### ECOMED NV

Smallandlaan 14 B - B-2660 Antwerpen  
T 03 889 26 40 - info@ecomед.eu  
www.ecomed.eu

Bestellingen via orders@ecomед.eu

### ECOMED NEDERLAND BV

Binderij 7 R - 1185 ZH Amstelveen  
T 020 808 51 34 - info@ecomед.eu  
www.ecomed.eu

Bestellingen via bestellingen@ecomед.eu