


Tristel Duo™

Oftalmologie


Hoog niveau desinfectieschuim voor semikritische oogheelkundige instrumenten



1
Breng twee doses Tristel Duo aan op een Tristel Dry Wipe of direct op het instrument.

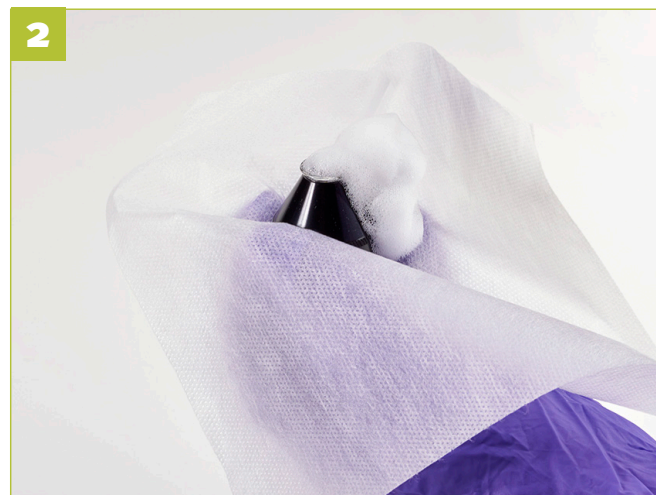

2
Wrijf het schuim uit over het instrument en zorg ervoor dat het gehele oppervlak bedekt wordt.

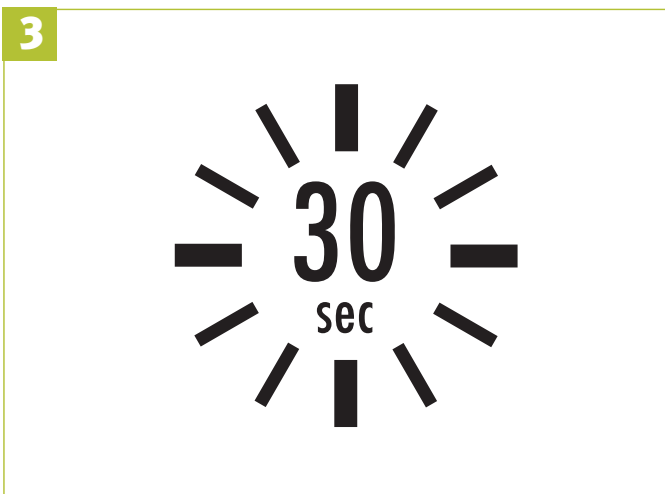

3
Respecteer de contacttijd van minimaal 30 seconden.



4
Spoel het instrument na met steriel water. Tristel Rinse Wipes worden aanbevolen.

Opmerkingen:

- Verzeker u van een schoon oppervlak. Indien het oppervlak niet schoon is, reinig het medisch hulpmiddel. Tristel Pre-Clean Wipes worden hiervoor aanbevolen.
- Ontsmet handen en draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij het omgaan met desinfecterende middelen en medische hulpmiddelen.
- Gooi de doekjes en handschoenen weg in overeenstemming met de richtlijnen van het ziekenhuis.
- Volg altijd de ziekenhuisprotocollen en de instructies van de fabrikant op.
- Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is.
- Alleen voor professioneel gebruik.

Tristel

Created by: Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

Voor Tristel octrooi-informatie kunt u terecht op <http://www.our-patents.info/tristel>

ecoméd
Innovative in reducing infection risk

Exclusieve verdeler Benelux en Frankrijk:
Ecomed NV, Smallandlaan 14 B, 2660 Antwerpen, België - T 3 889 26 40
Ecomed Nederland bv, Binderij 7 R, 1185 Amstelveen, Nederland - T 020 808 51 34
E info@ecoméd.eu - W www.ecomed.eu

Copyright © 2016 Tristel Solutions
MKI-Wal-125-1