


Une solution complète pour une désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux sans canal opérateur.

 Se référer au guide d'utilisation pour des instructions complètes.

Notes:

- Toujours suivre les protocoles hospitaliers et les instructions du fabricant.
- Se désinfecter les mains et porter des EPI appropriés lors de la manipulation des désinfectants et des dispositifs médicaux.
- Un pré-nettoyage initial doit être effectué immédiatement après l'utilisation du dispositif médical, conformément au protocole hospitalier.
- Veillez à ne pas froter ou plier l'instrument et porter une attention particulière aux bords, arêtes et rainures.
- Préparez-vous pour la procédure de décontamination en prenant une lingette de chaque et la Mousse Activatrice de la boîte.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et/ou si les lingettes sont sèches.
- Utiliser plusieurs lingettes si nécessaire pour assurer une propreté visible du dispositif.
- Garder les sachets des lingettes utilisées à côté du livret de traçabilité pour que les détails puissent être complétés à la fin de la procédure.
- Jeter les lingettes et les gants conformément aux consignes de l'hôpital.
- Uniquement pour utilisation professionnelle.

POUR LES CATHÉTERS
DE MANOMÉTRIE

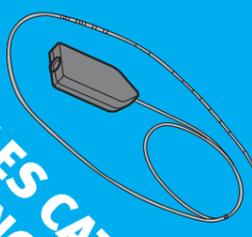

ÉTAPE 1 : NETTOYER



Retirer la lingette pré-nettoyante de son sachet et l'étaler dans la paume de votre main.

Essuyer la surface du dispositif médical jusqu'à ce que la saleté et les matières organiques soient visiblement retirées.

Jeter la lingette et les gants avec les déchets à risque infectieux.

Se désinfecter les mains et mettre de nouveaux gants.

ÉTAPE 2a + 2b : ACTIVER




Retirer la lingette sporicide de son sachet et l'étaler dans la paume de votre main.

Prendre le flacon de "Mousse Activatrice" et appliquer deux doses de Mousse Activatrice sur la Lingette.

Plier la Lingette sur elle-même et malaxez-la pendant **15 secondes** pour générer le dioxyde de chlore.

S'assurer que la lingette soit complètement recouverte de mousse.

ÉTAPE 2 : DÉSINFECTER DE HAUT NIVEAU

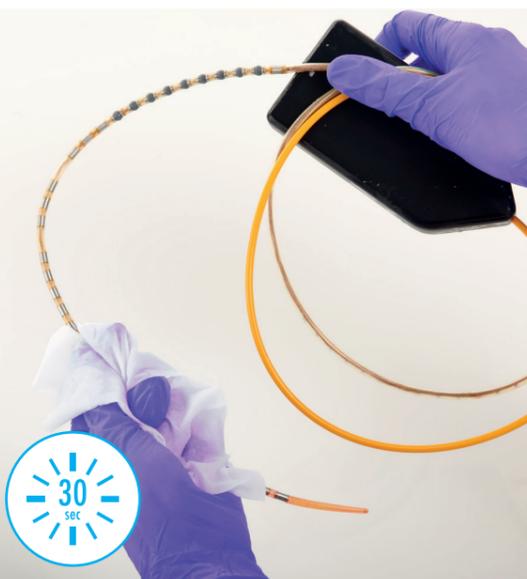

Essuyer la surface du dispositif en un mouvement de manière à le recouvrir de mousse, en veillant que toutes les parties rentrent en contact avec la Lingette.

Jeter la lingette avec les déchets à risque infectieux.

Observer un temps de contact de **30 secondes**.

ÉTAPE 3 : RINCER



Retirer la lingette de rinçage de son sachet et l'étaler dans la paume de votre main.

Rincer l'instrument pour retirer l'excès de désinfectant.

Jeter la lingette avec les déchets à risque infectieux.

ÉTAPE 4 : TRACER



Se référer aux sachets des lingettes utilisées et au flacon de la Mousse Activatrice pour compléter le livret de traçabilité.