

Tristel Trio™

Wipes System


Une solution complète pour une désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux sans canal opérateur.

 Se référer au guide d'utilisation pour des instructions complètes.

Notes:

- Toujours suivre les protocoles hospitaliers et les instructions du fabricant.
- Se désinfecter les mains et porter des EPI appropriés lors de la manipulation des désinfectants et des dispositifs médicaux.
- Un pré-nettoyage initial doit être effectué immédiatement après l'utilisation du dispositif médical, conformément au protocole hospitalier.
- Veillez à ne pas froter ou plier l'instrument et porter une attention particulière aux bords, arêtes et rainures.
- Préparez-vous pour la procédure de décontamination en prenant une lingette de chaque et la Mousse Activatrice de la boîte.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et/ou si les lingettes sont sèches.
- Retirer la gaine/préservatif et le gel à ultrasons de la sonde avec une lingette et la jeter dans les déchets à risque infectieux.
- Utiliser plusieurs lingettes si nécessaire pour assurer une propreté visible du dispositif.
- Garder les sachets des lingettes utilisées à côté du livret de traçabilité pour que les détails puissent être complétés à la fin de la procédure.
- Jeter les lingettes et les gants conformément aux consignes de l'hôpital.
- Uniquement pour utilisation professionnelle.

**POUR LES SONDES
D'ÉCHOGRAPHIES
ENDOCAVITAIRES EN
RADIOLOGIE**

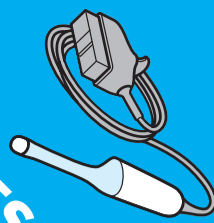

ÉTAPE 1 : NETTOYER



Retirer la lingette pré-nettoyante de son sachet et l'étaler dans la paume de votre main.

Essuyer la surface du dispositif médical jusqu'à ce que la saleté et les matières organiques soient visiblement retirées.

Jeter la lingette et les gants avec les déchets à risque infectieux.

Se désinfecter les mains et mettre de nouveaux gants.

ÉTAPE 2a + 2b : ACTIVER



Retirer la lingette sporicide de son sachet et l'étaler dans la paume de votre main.

Prendre le flacon de "Mousse Activatrice" et appliquer deux doses de Mousse Activatrice sur la Lingette.

Plier la Lingette sur elle-même et malaxez-la pendant **15 secondes** pour générer le dioxyde de chlore.

S'assurer que la lingette soit complètement recouverte de mousse.

ÉTAPE 2 : DÉSINFECTER DE HAUT NIVEAU



Essuyer la surface du dispositif en un mouvement de manière à le recouvrir de mousse, en veillant que toutes les parties rentrent en contact avec la Lingette.

Si nécessaire, utiliser un coton-tige pour faire pénétrer la mousse dans des rainures.

Jeter la lingette avec les déchets à risque infectieux.

Observer un temps de contact de **30 secondes**.

ÉTAPE 3 : RINCER



Retirer la lingette de rinçage de son sachet et l'étaler dans la paume de votre main.

Rincer l'instrument pour retirer l'excès de désinfectant.

Jeter la lingette avec les déchets à risque infectieux.

ÉTAPE 4 : TRACER



Se référer aux sachets des lingettes utilisées et au flacon de la Mousse Activatrice pour compléter le livret de traçabilité.

Tristel™

Établi par: Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

Suisse: Tristel AG, Sandgrube 29, CH-9050, Appenzell - T +41 715670658 - E schweiz@tristel.com

Belgique et Grand-Duché de Luxembourg: Tristel SA, Anvers, Belgique - T 03 889 26 40 - E belgium@tristel.com

France: Tristel SAS, 130, Boulevard de la Liberté, 59000 Lille - T 03 66 88 01 84 - E france@tristel.com

Informations sur les brevets sous : <http://www.our-patents.info/tristel>

Copyright © Tristel Solutions
Mkt-Wal-890-1
July 2019