

SYSTÈME DE TRAÇABILITÉ NUMÉRIQUE  
CONÇU POUR FORMER, SUIVRE ET TRACER  
DE FAÇON EFFICACE, SÉCURISÉE ET PRÉCISE

## LE PORTAIL 3T

PORTAIL PROTÉGÉ PAR MOT DE PASSE POUR LA  
CONFIGURATION 3T, GESTION DES DONNÉES AUX FINS  
D'ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS.

RASSEMBLE TOUS LES ENREGISTREMENTS DE  
DÉSINFECTION POUR UNE EXTRACTION DANS UN  
FICHIER CSV.

PERMET EN UN SEUL CLIC AUX ADMINISTRATEURS DE  
3T D'ORGANISER LES DONNÉES ET DE SURVEILLER LE  
PROGRÈS DE MANIÈRE CENTRALISÉE ET SÉCURISÉE.



### SÉCURITÉ

De stockage de données  
dans le Cloud Microsoft Azur



### RAPIDE

Accélère tout processus de  
traçabilité manuelle




### PRÉCIS

Procédure sans papier.  
Plus d'écriture manuelle



### INGÉNIEUX

Le premier système unique  
de traçabilité sous forme  
d'application pour procédures  
de désinfection Tristel

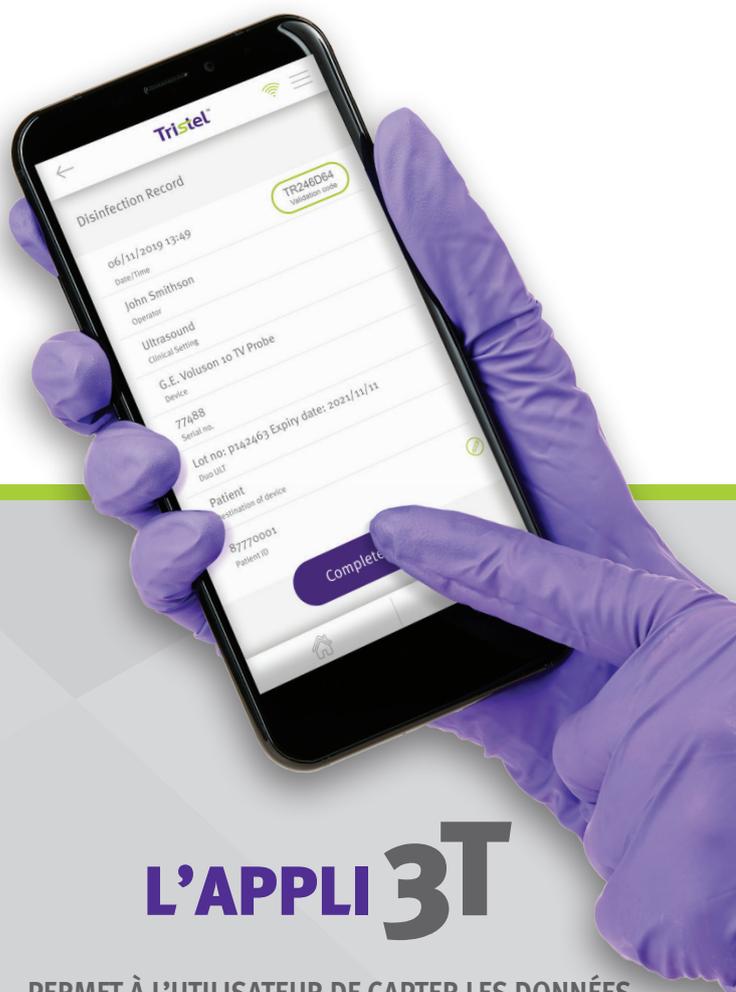

## L'APPLI 3T

PERMET À L'UTILISATEUR DE CAPTER LES DONNÉES  
DU DÉSINFECTANT, DU DISPOSITIF ET DU PATIENT EN  
CONFORMITÉ AVEC LE (GDPR) RGPD.

GUIDE LES UTILISATEURS DE L'APPLICATION 3T À  
TRAVERS LES ÉTAPES DE LA DÉSINFECTION PAR LE  
BIAIS DE COURTES VIDÉOS FACULTATIVES.

GÉNÈRE UN ENREGISTREMENT DE DÉSINFECTION  
3T INCLUANT L'HORODATAGE ET UN CODE DE  
VALIDATION UNIQUE POUR FACILITER LE SUIVI AINSI  
QUE LA TRAÇABILITÉ.

SYNCHRONISE LES ENREGISTREMENTS DE  
DÉSINFECTION AVEC LE PORTAIL 3T LORSQUE LE WIFI  
EST ACTIVÉ.



### CONFIGURATION DE VOTRE COMPTE UTILISATEUR



### ENREGISTREMENT DE L'OPÉRATEUR, DU DÉSINFECTANT, DE L'INSTRUMENT & DES DONNÉES DU PATIENT



### DÉSINFECTION DE VOTRE DISPOSITIF MÉDICAL



### TRACABILITÉ DE TOUTE PROCÉDURE DE DÉSINFECTION



### VÉRIFICATION ET RAPPORTAGE DES DONNÉES ENREGISTRÉES

# ENVISAGEZ LA TRAÇABILITÉ NUMÉRIQUE

**Tristel 3T est conçu pour assurer la traçabilité et la conformité de manière intelligente et efficace. Il comprend un Portail pour la configuration et la gestion des données afin d'établir des rapports, ainsi qu'une application pour enregistrer les procédures de désinfection avec Tristel.**



#### SAISIE COMPLÈTE DU PROCESSUS

Lorsque l'application est utilisée en association avec un produit Tristel, 3T saisit les données relatives à l'opérateur, au désinfectant (LOT et date de péremption) ainsi qu'aux données de l'instrument et les données du patient si nécessaire. Les données du désinfectant peuvent être saisies manuellement ou en scannant les codes-barres matriciels 2D sur l'emballage de Tristel.



#### FORMATION FACULTATIVE

De courtes vidéos dans l'application 3T guident l'opérateur à chaque procédure de désinfection afin de garantir la conformité avec les instructions d'utilisation. Si un opérateur est parfaitement formé à l'utilisation d'un produit Tristel, l'administrateur 3T peut désactiver les vidéos pour cet opérateur simplement en décochant la case vidéo dans le Portail. Si un rappel est nécessaire, vous pouvez réactiver les vidéos en appuyant simplement sur un bouton.



#### PROCÉDURES DE DÉSINFECTION PERSONNALISÉES

Les procédures de désinfection standard peuvent varier. 3T a été développé dans l'esprit de l'agilité ; si une étape de pré-nettoyage doit être ajoutée à un événement de désinfection Tristel Duo ou si seule l'étape de désinfection de haut niveau doit être capturée dans le cadre d'un événement de décontamination Trio, l'administrateur 3T peut configurer la procédure en tant que telle via le Portail.



#### OPÉRATION SANS CONTACT MANUEL OPÉRATION TOUCH-FREE

Lorsque les vidéos de formation sont activées, les opérateurs de l'application 3T peuvent parcourir les étapes en agitant la main devant l'écran. Cela évite tout contact lors de la désinfection entre les mains gantées de l'opérateur et le périphérique 3T.



#### SÉCURITÉ & PROTECTION DES DONNÉES

3T est hébergé par Tristel sur un serveur Microsoft Azure Cloud. Microsoft a pris des mesures pour sécuriser les données et a mis en place plus de 20 certificats de sécurité réalisés dans le cloud computing (informatique dématérialisée), incluant ISO 27001 (sécurité de l'information) et ISO 27018 (protection des données à caractère personnel). Microsoft se conforme également aux exigences des normes internationales et spécifiques au secteur et participe à des audits rigoureux menés par des tiers qui vérifient les contrôles de sécurité.

En plus, 3T a été développé conformément au dernier règlement général sur la protection des données (GDPR) entré en vigueur le 25 mai 2018.



#### ACTE SANS PAPIER

Les enregistrements de désinfection produits par l'application 3T sont numériques. La synchronisation entre l'application et le portail se produit lorsqu'une connexion Wifi est établie. À la fin d'une procédure de désinfection, l'application 3T génère un enregistrement numérique de désinfection avec un horodatage et un code de validation unique.

Chaque enregistrement est ensuite téléchargé dans le journal de désinfection de l'application 3T et synchronisé sur le portail 3T lorsque le Wi-Fi est activé.

Les administrateurs 3T peuvent accéder à tous les enregistrements de désinfection via le portail et les extraire dans un fichier CSV.



#### CE QUI EST INCLU:

- Appareil 3T avec application 3T installée
- Accès au portail 3T
- Instructions d'installation et de mise à jour
- Chargeur
- Service (3 ans)
- Garantie (1 an)

DEVELOPPÉ PAR:

# Tristel™

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter votre représentant Tristel local ou envoyez un mail à [3Tsupport@tristel.com](mailto:3Tsupport@tristel.com)

**Suisse:** Tristel AG  
Sandgrube 29, CH-9050, Appenzell  
T +41 715670658 - E [schweiz@tristel.com](mailto:schweiz@tristel.com)

**France:** Tristel SaS  
130, Boulevard de la Liberté, 59000 Lille  
T 03 66 88 01 84 - E [france@tristel.com](mailto:france@tristel.com)

**Belgique et Grand-Duché Luxembourg:**  
Tristel SA, Anvers, Belgique  
T 03 889 26 40 - E [belgium@tristel.com](mailto:belgium@tristel.com)

**United Kingdom:** Tristel Solutions Limited  
Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY  
T +44 (0) 1638 721500 - W [www.tristel.com](http://www.tristel.com)