

TRAIN, TRACK EN TRACE
EFFICIËNT, VEILIG EN ACCURAAAT
MET HET DIGITALE TRACEERSYSTEEM VAN TRISTEL



ZET UW

3T-TOESTEL AAN



VERBIND

MET WIFI



DRUK OP

'APP CATALOG'
=>'TRISTEL APP'
=>'UPDATE'



WACHT

EEN PAAR MINUTEN TOT DE
UPDATE GEDOWNLOAD IS



WERK

DE APP VERVOLGENS BIJ DOOR
OP NEXT/OK TE DRUKKEN ALS
WORDT GEVRAAGD OF U WILT
INSTALLEREN



VOER

UW INSTALLATIECODE IN
OM DE BIJGEWERKTE 3T
APP TE GEBRUIKEN*

*Gelieve bij vragen uw systeembeheerder of Tristel te contacteren om problemen met uw installatiecode op te lossen.

ONTWIKKELD
DOOR:

Tristel™

Gelieve voor vragen contact op te nemen met uw plaatselijke
Tristel-vertegenwoordiger of stuur een e-mail naar 3Tsupport@tristel.com

United Kingdom: Tristel Solutions Limited
Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY
T +44 (0) 1638 721500 - W www.tristel.com

België: Tristel NV
Smallandlaan 14 B, 2660 Antwerpen, België
T +32 (0)3 889 26 40 - E belgium@tristel.com

Nederland: Tristel B.V.
Binderij 7 R, 1185 ZH Amstelveen, Nederland
T 020 808 51 34 - E nederland@tristel.com